



Markeer de objectglasjes met potlood aan de zijde van het uitstrijkje met naam van de patiënt, eigenaar en praktijk.

Niet merken met watervaste stift, geen stickers of dekglas op het objectglas aanbrengen.



Plaats de objectglasjes in een plastic objectglashouder en vervolgens in een stofvrij zakje. Geen objectglashouders meer? Deze worden door ons gerecycled en zijn, zolang de voorraad strekt, derhalve ook via ons te verkrijgen. Vermeld op de objectglashouder ook de gegevens van de patiënt, eigenaar en praktijk.



Plaats het gevulde zakje en het inzendformulier in de luchtkussen envelop. Let op! Eventueel tegelijkertijd te verzenden formalinemateriaal altijd in een aparte lekvrije sealbag. De verpakkingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingseisen (ADR-2009). Meer hierover vind u op [www.minigrip.nl](http://www.minigrip.nl) en/of [www.TNT.com](http://www.TNT.com).

Adresseer de luchtkussen envelop; hier zijn voorgedrukte VPDC adresstickers voor beschikbaar. Indien er gebruik gemaakt wordt van de TNT Innight service kunnen de stickers via de volgende website worden opgevraagd: [www.uu.nl](http://www.uu.nl) > Faculteiten > Diergeneeskunde > Laboratoria > UVDL > Ophaaldienst

**Voordelen**

- eenvoudige techniek
- snel resultaat
- weinig invasief

**Nadelen**

- geen weefselverband te beoordelen
- niet alle massa's zijn geschikt om aan te prikken
- diagnose is niet altijd eenduidig, slechts een leidraad

Cytologie is dan ook geen vervanging van histologie

**Benodigheden**

- standaard plastic wegwerp spuit 5-10 cc
- droge schone objectglasjes met matrand
- dunne naald (22-23 Gauge)
- potlood
- desinfectans

Zachte weefsels zijn het meest geschikt om aan te prikken; cellen laten makkelijk los uit het weefselverband.

- gebruik bij aspiratie een passend vacuüm, niet te hoog
- aspireer in meerdere richtingen vanuit de massa
- breng kleine hoeveelheden aspiraaf voorzichtig en met weinig druk op het objectglas: maximaal 4 uitstrijkjes per dier voor 1x tarief.
- maak van vloeibaar materiaal directe uitstrijkjes en uitstrijkjes van het sediment na centrifugeren
- strijk het materiaal dun uit en zorg voor een dun uitlopend einde
- droog de glaasjes aan de lucht
- laat glaasjes niet in aanraking komen met formaline damp, ook niet na drogen en bij opsturen
- markeer de glaasjes met potlood aan de zijde van het uitstrijkje met gegevens van de patiënt, eigenaar, dierenartspraktijk etc.
- verstuur het materiaal goed verpakt inclusief los inzendformulier met daarop een duidelijke anamnese

**Inzenden naar:**

Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum  
Postbus 80158  
3508 TD Utrecht

Voor inzendformulieren kunt u bellen naar de patiëntenadministratie 030-2533195. Via dit nummer zijn wij ook tijdens kantooruren bereikbaar voor het opvragen van uitslagen en dergelijke.

**voor vragen:**

Administratie VPDC  
Telefoonnummer: 030-2533195  
Faxnummer: 030-2534774  
E-mail: [vpdc@uu.nl](mailto:vpdc@uu.nl)

Voor het bespreken van een uitslag met een veterinair patholoog hebben wij een spreekuur van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 15:00 uur via telefoonnummer: 030-2533114



Neem een waterdichte, breukvrije primaire container met een brede hals gevuld met 4% m/v gebufferde formaldehyde. Verhouding formaline: weefsel moet zijn 10:1.

Vermeld op de container de gegevens van de patiënt, eigenaar en de praktijk met een watervaste stift of een etiket.



Verpak de container in absorberend materiaal en plaats deze in de lekvrije sealbag.

Het anamneseformulier hoort niet in de sealbag. Deze graag apart verpakken.



Plaats de sealbag met anamneseformulier in een luchtkussen envelop of doosje.



Adresseer de luchtkussen envelop of het doosje; hier zijn voorgedrukte VPDC adresstickers voor beschikbaar. Indien er gebruik gemaakt wordt van de TNT Innight service kunnen de stickers via de volgende website worden opgevraagd: [www.uu.nl](http://www.uu.nl) > Faculteiten > Diergeneeskunde > Laboratoria > UVDL > Ophaaldienst.  
De verpakkingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingseisen (ADR-2009). Meer hierover vind u op [www.minigrip.nl](http://www.minigrip.nl) en/of [www.TNT.com](http://www.TNT.com)

### Benodigheden

- waterdichte, breukvrije potjes met wijde hals met 4% m/v gebufferde formaldehyde. Verhouding formaline: weefsel moet zijn 10:1
- watervaste stift (of adresstickers)
- sealbag met absorberend materiaal
- luchtkussen envelop of doosje
- adresstickers of gele TNT Innight stickers
- inzendformulier

### Belangrijk!

- grote weefselstukken insnijden, indien bedekt met huid, insnijden vanaf huidzijde. Bij insnijden van een weefselstuk om fixatief te laten indringen is het raadzaam om zodanig te snijden dat het kritische gedeelte intact blijft.
- indien het niet mogelijk is het weefsel als geheel op te sturen, dan kunnen enkele representatieve stukjes uit het centrum en de rand worden geoogst. Necrose materiaal vermijden.
- gebruik een lekvrije primaire container met wijde hals.
- plaats representatieve stukjes weefsel, maximaal 1 cm dikte in voldoende 4% m/v gebufferde formaldehyde, verhouding formaline: weefsel moet zijn 10:1.
- geen losse organen droog in een sealbag (ook al is het orgaan eerder op de praktijk gefixeerd).